

CLIENTE / Customer : FARMIGEA
BOZZA DEL / Proof date : n° 3 del 07 - 03 - 2013
PRODOTTO / Product : Lacri-yal leaflet CODICE / Code : 202165/02
CARTA / Paper : Meccanografica senza legno GR/MQ / Gr/mq : 50
F.TO POSA STESA / Size flat : 135 x 220 F.TO POSA PIEGATA / Size folded : 28 x 135
STAMPA SU LATO / Printing : BIANCA / Top side : <input checked="" type="checkbox"/> VOLTA / Reverse side : <input checked="" type="checkbox"/>
DIREZIONE FIBRA PARALLELA AL LATO / Fiber parallel to side : LUNGO (mm.)
PIEGATURE N. / Fold No. :
COLORI / Fold No. : NERO
NOTE / Notes : X I X X X I I I I

	CONF.	NON CONF.	FIRMA	DATA
REG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	07.03.13
C.Q.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	09.03.13
C.T.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	CONF.	NON CONF.	FIRMA	DATA
1° CONTROLLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	09.03.13
C.T.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	09.03.13
Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	

CHG. 9113

202165/02

Lacri-yal

SOLUZIONE IDRATANTE, LUBRIFICANTE, LENITIVA

Lacri-yal è una soluzione oftalmica a base di acido ialuronico sale sodico 0,2%. L'acido ialuronico, grazie alle sue proprietà chimico-fisiche, aderisce perfettamente alla superficie corneale e così ne consente una proficua idratazione e lubrificazione.

L'acido ialuronico impiegato nel Lacri-yal è di origine biotecnologica e di alto peso molecolare tale da conferirgli alto potere di adesione e lungo tempo di permanenza a contatto con la cornea.

Rappresenta il rimedio ideale in caso di secchezza oculare dovuta a vari fattori quali stress, polveri, fumo, esposizione prolungata ai raggi solari, lavoro continuo ai videoterminali, lunghi periodi di guida, uso di lenti a contatto.

COMPOSIZIONE :

Sodio ialuronato 0,2%; Sodio fosfato monobasico monoidrato; Sodio fosfato bibasico dodecaidrato; Sodio cloruro; Benzalconio cloruro; EDTA bisodico biidrato; Acqua WFI.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Esercitare una leggera pressione sul corpo del flacone.
- Applicare 1 - 2 gocce per occhio.
- E' possibile ripetere l'operazione più volte al giorno, secondo necessità.

MISURE PRECAUZIONALI ED AVVERTENZE:

- Il prodotto è solo per uso esterno oftalmico.
- Evitare di toccare l'occhio con la punta del flacone.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- Non usare il flacone dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Il prodotto deve essere usato entro 30 giorni dalla prima apertura del flacone.
- Non disperdere il flacone nell'ambiente dopo l'uso.
- Non conservare al di sopra dei 25°C.

Tenere il preparato fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

FABBRICANTE: Farmigea S.p.a. Via G.B. Oliva 8, 56121 Pisa

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO: OFTAL3ITALIA srl - Via Giacomini, 4 - 50132 Firenze

DATA ULTIMA REVISIONE DELTESTO: Giugno 2011

STERILE A

CE 0546

Oftal3
ITALIA Srl

Via Giacomini, 4 - 50132 Firenze
info@oftal3italia.it www.OFTAL3ITALIA.IT

Sara Donnalioia

Da: oftal
Inviato: giovedì 7 marzo 2013 20:28
A: sara.donnaloia@farmigea.it
Oggetto: I: R: R: R: R: R: foglietto LacriYal 202165/02
Allegati: 202165_02 Lacri-Yal leaflet.pdf

Va Bene
Luigi Blago

----Messaggio originale----

Da: sara.donnaloia@farmigea.it

Data: 07/03/2013 11.58

A: "oftal" <oftal3italiasrl@libero.it>

Cc: "Iacopo Fascione" <i.fascione@farmigeagroup.it>

Ogg: I: R: R: R: R: R: foglietto LacriYal 202165/02

Gentile Dr Blago

Per problemi di lettura della macchina dei barcode laetus abbiamo dovuto apporre una piccola modifica al foglietto: Il laetus alla sinistra è stato impostato su sfondo bianco.

Spero che per lei non ci siano problemi al riguardo. Le allego comunque la bozza revisionata.

Nel pomeriggio le invierò anche l'astuccio campioni per sua approvazione finale.

In attesa di un suo gentile feedback

Un cordiale saluto

Sara